



Labinfo

Information från Aleris Medilab

Ny remiss för hälsokontroller

Aleris Medilab klinisk kemi kommer från och med 190522 att byta hälsokontrollremiss för klinisk kemi. Från den dagen går det inte att använda de gamla remisserna, utan dessa måste kasseras utan undantag. De nya remisserna kommer att skickas ut i god tid till bytet.

Efter remissbytet kommer Glukos att enbart analyseras på plasma taget i rör med rosa propp för venprovtagning där fördelen är att glukosnivån stabiliseras omedelbart. Röret innehåller förutom natrium-fluorid även citratbuffert (kallas för "FC-Mixture"). FC-Mixture-röret kan därför förvaras ocentrifugerat en längre tid än nuvarande rör; rekommenderad hållbarhet som helblod: Upp till 96 timmar i rumstemperatur. EDI-koden för P-Glukos är ML201041.

Viktig information för provtagning:

- **Röret måste vändas 10 gånger direkt efter provtagning. Otillräcklig blandning resulterar i hemolys och kan medföra att Glukos inte kan besvaras.**
- **För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår in provtagningen.**

Röret ska endast användas för analys av Glukos och inte användas för analys på patientnära glukosinstrument.

För frågor angående remissleveranser, kontakta Jonas Westberg, serviceavdelningen 08-123 191 18.

Vid frågor ring Aleris Medilab tel: 08-123 191 60.

Christian Löwbeer
Överläkare
Klinisk kemi

Cecilia Gälman
Laboratoriechef
Klinisk kemi

Aleris Medilab AB

Besöksadress Centrallaboratoriet: Nytorpsvägen 30, Näsbypark.
Postadress: Box 1550, 183 15 Täby.
Telefon: 08-123 191 00, Fax: +46 8 123 191 04, E-post: medilab@aleris.se

Aleris är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård i Sverige, Norge och Danmark.
Aleris ägs av Patricia Industries – en del av Investor

